

## Hinweise zur




Entnahme von Material für die Analyse  
Parodontitis-pathogener Bakterien<sup>1</sup>

Auf die Entnahme aus stark blutenden Taschen verzichten. Nicht unmittelbar nach PZR, PI, BOP-Erhebung, Sondierung etc. entnehmen.

Für die Untersuchung vier Entnahmestellen wählen:  
Erste Molaren mesiovestibulär oder suspekta Stellen

## Proben-Entnahme:

- 1** Relative Trockenlegung, kurzer sanfter Stoss mit Luftbläser, nicht zu stark trocknen, Zahn nur von Speichel befreien.
- 2** Sterile Papierspitze mit Pinzette am Ende anfassen und aus dem Behältnis nehmen.
- 3** Spitze mit der Pinzette in die zu untersuchende Tasche einführen.
- 4** Spitzen 20-30 Sekunden in der Tasche belassen.
- 5** Spitzen entnehmen und in beiliegende Reagenzröhrchen geben. Für die Entnahmenstellen 2 bis 4 analog verfahren.  
Hinweis: bei Poolproben alle 4 Spitzen in ein Röhrchen geben, bei 4-Stellen-Probe jede Spitze in ein anderes Röhrchen geben.
- 6** Reagenzröhrchen mit ausgefülltem Begleitschein an dentognostics - dentolabs Jena - senden.

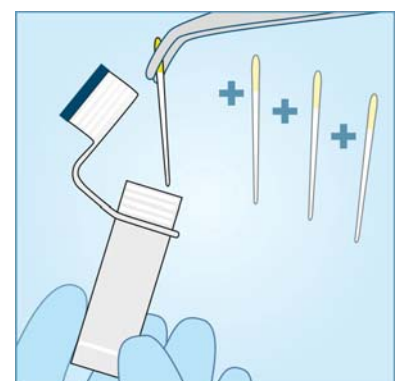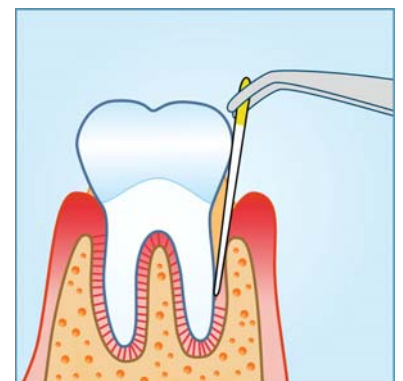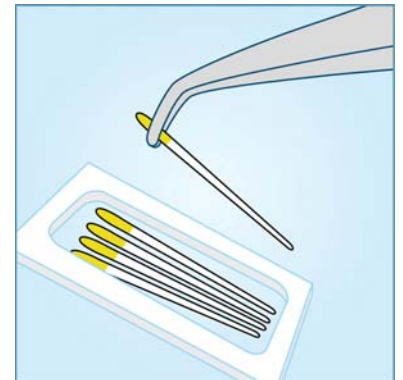

Für die Ergebnisinterpretation bitte Angaben zum Patienten, zur Entnahmestelle (Taschentiefe), Status der Behandlung sowie ggf. erfolgter antimikrobieller Therapie nicht vergessen.

<sup>1</sup> *A.actinomycetemcomitans*, *P.gingivalis*, *P.intermedia*, *T.forsythensis*, *T.denticola*